

Instrucțiuni de utilizare

200-23__

VERTYS TEMPLUS MONOMASSA de Claudio Nannini

Rășină pentru lucrări provizorii

Rev. 25/11/2015

Gama de rășini pentru lucrări provizorii Vertys Templus s-a îmbogățit cu un nou Proiect: "Monomasele Vertys Templus de Claudio Nannini". Această monomasă este un amestec de Dentine, Smalturi și Culori intensificatoare gândită pentru realizarea de lucrări temporare rapide și economice într-un unic proces de coacere. Noile monomase permit o economie de timp considerabilă, dând lucrării o excelentă valoare estetică.

Indicată pentru Toronto Bridge temporare, pentru Provizorii în Pre-șlefuire, Pre-extracție, Cloni în proteză totală etc.

Dacă doriți să obțineți o mai bună transparență, adăugați 200-2357 TRANSPARENT la monomasa aleasă; dacă însă doriți să obțineți o colorație mai intensă, utilizați culoarea 200-2389 VERTYS TEMPLUS INTENSIVE ORANGE.

Rășina în monomasă **Vertys Templus by Claudio Nannini** poate fi combinată cu toate produsele din gama **Vertys Templus** tradiționale.

DOZARE

10 g de praf și 4-6 g de lichid

O cantitate excesivă de lichid va spori contracția.

PREGĂTIRE

Turnați amprenta din alginat sau silicon cu gips. Pregătiți bonturile folosind micromotorul și instrumentele pentru gips conform procedurii obișnuite (în cazul lucrărilor provizorii în pre-șlefuire). Introduceți modelul din gips în apă la 45 °C timp de 10 minute pentru a obține saturația acestuia.

Lăsați la uscat și izolați modelul cu **VERTYS LUBE**.

Cântăriți cantitatea necesară de praf și de lichid pentru rășina acrilică

VERTYS TEMPLUS MONOMASSA în proporție 1: 2 (exemplu: 1 g de lichid- 2 g de praf). Vărsați într-un recipient de porțelan sau sticlă mai întâi lichidul, apoi praful. Amestecați bine până la obținerea unui amestec omogen. Lăsați să se odihnească timp de 15 secunde, apoi amestecați din nou alte 5 secunde.

În cazul injectării cu seringă, folosind tehnica **VERTYSYSTEM®**, așteptați ca amestecul să devină vâscos. Turnați acum rășina într-o seringă de unică folosință de cel puțin 10 cc. Rășina este gata și poate fi injectată în mufla **FURBO ALU SAMLL/BIG** a **VERTYSYSTEM®**.

Timpii indicați se referă la o temperatură a materialului și a camerei de 20-23 °C.

Valori de temperatură mai mari sau mai mici pot influența timpii indicați.

VERTYS TEMPLUS MONOMASSA poate fi personalizată utilizând 200-2390 **VERTYS TEMPLUS ARTIST KIT** (praf: **VERTYS TEMPLUS WHITE** - **MU- STARD** - **BROWN** lichid fotopolimerizabil: **VERTYS TEMPLUS GLAZE**).

POLIMERIZARE

Presă termică (sau oală de polimerizare) timp de 20-30 minute la 2-3 bar la 40-50 °C

AMBALAJ:



MONOMASSA
100 g



MONOMASSA
500 g

Instrucțiuni de utilizare

200-23_ _

VERTYS TEMPLUS MONOMASSA de Claudio Nannini

Rășină pentru lucrări provizorii

Rev. 25/11/2015

4 categorii:

MM-1

Culoare deschisă pentru Fațete estetice. Această culoare a fost gândită pentru realizarea de fațete directe.

Pornind de la această Bază de culoare deschisă se poate obține colorația dorită adăugând intensificatorul Orange.

Baza de pornire a monomasei MM-1 corespunde eșantionului A1.

Cod. 200-2371 100g Cod. 200-2372 500g

MM-2

Amestecul corect de Dentine, Smalțuri și intensificatori fac din această monomasă soluția ideală pentru 90% din lucrările provizorii.

Baza de pornire a monomasei MM-2 corespunde eșantionului A2 /A3

Posibilitate de intensificare a colorației utilizând intensificatorul Orange.

Cod. 200-2374 100g Cod. 200-2375 500g

MM-3

Culoare intensă având ca bază de pornire eșantionul A3,5. Tonalitate caldă. Monomasă indicată pentru lucrări în A3,5/A4.

Posibilitate de intensificare a colorației utilizând ulterior intensificatorul Orange.

Cod. 200-2377 100g Cod. 200-2378 500g

MMG-1

Culoarea reflectă eșantionul D3 cu o transparență majoră. În zonele mai groase această monomasă va rezulta mai saturată. Rezultatul va fi o rășină cu un bun echilibru de transparență și culoare cu reflexe gri. Baza de pornire a monomasei MMG-1 corespunde eșantionului D3.

Cod. 200-2383 100g Cod. 200-2384 500g



PRODUS

200-2367
TRANSPARENT

UTILIZARE

EFFECT DE TRANSPARENTĂ

200-2389
VERTYS TEMPLUS INTENSIVE ORANGE

PENTRU O COLORAȚIE MAI INTENSĂ POATE FI
ADĂUGAT LA TOATE MONOMASELE

200-2300
VERTYS TEMPLUS LIQUID COLD

MONOMER PENTRU MONOMASĂ DE 100 ML

200-2301
VERTYS TEMPLUS LIQUID COLD

MONOMER PENTRU MONOMASĂ DE 500 ML

Instrucțiuni de utilizare

200-23__

VERTYS TEMPLUS MONOMASSA de Claudio Nannini

Rășină pentru lucrări provizorii

Rev. 25/11/2015

SCURTE INDICAȚII PRIVITOARE LA DEPOZITARE ȘI SIGURANȚĂ:

Nu utilizați produsul dacă a expirat.

Păstrați în loc uscat în recipiente închise ermetic. Temperatura camerei nu trebuie să depășească 30°C.

Compozenți iritanți, evitați contactul cu ochii și pielea, nu respirați prafurile.

Pentru o utilizare optimă a acestui produs cu VERTYSYSTEM®, descărcați Procedurile de Lucru disponibile la adresa web www.vertysystem.com

Se recomandă respectarea indicațiilor prezente în fișa de siguranță a produselor (praf și lichid).

IMPORTANT:

a.gree srl garantează caracteristicile specificate ale produselor vândute

Informațiile conținute în fișa tehnică și în instrucțiunile de utilizare se referă la nivelul actual al cunoștințelor companiei producătoare.

Neputând avea la cunoștință toate aplicațiile posibile pentru care produsele noastre pot fi utilizate, declinăm orice responsabilitate în cazul utilizărilor diferite de cele indicate.

Citiți întotdeauna cu atenție Instrucțiunile.

Compania producătoare își rezervă dreptul de a modifica sau îmbunătăți în orice moment produsul ori ambalajul acestuia.

0477 Dispozitiv medical de clasă IIa în conformitate cu Directiva 93/42/CEE cu modificările și completările ulterioare

Subsemnata, **ȘTEFANA FORGACIU**, traducător autorizat de M. J. cu nr. **37629**,
certific exactitatea traducerii în limba română, cu textul înscrisului în copie electronică, în limba italiană.

TRADUCĂTOR ȘTEFANA FORGACIU - AUTORIZAT cu nr. **37629**



Forgaciu