

Instrucțiuni de utilizare

10-2580

FURBO COMPOSITE

Ramă pentru matrițat și injectat compoziți fotopolimerizabili

Rev. 10/12/2015



10-401 VERTYS DINAMO BLOCK



10-2585 FURBO COMPOSITE UPBOX



10-2524 VERTYS FURBO PLATE



10-103 FERMO VERTYS FURBO -DADO DI BLOCAGGIO



10-2582 FURBO COMPOSITE COVER



10-2583H FURBO COMPOSITE SPACER H 6mm



10-2588 FURBO COMPOSITE CUBE



10-2587 FURBO COMPOSITE SEPARATOR



10-2586 FURBO COMPOSITE INSIDE



10-2583 FURBO COMPOSITE RING



10-2510 VERTYS FURBO BASE



10-2589 FURBO COMPOSITE LONG AXIS 54 mm
10-2589L FURBO COMPOSITE SHORT AXIS 48 mm

Produse recomandate

Vertys Heavy Glass



200-2009
2 buc x
50ml
Shore A 72

Vertys Light Glass



200-2008
1Kg A + 1Kg B
Shore A 22


Vertys Medium Glass





200-2015
0,5Kg A + 0,5Kg B
Shore A 50

Măsur:

10-2586 FURBO COMPOSITE INSIDE

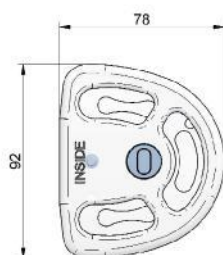

10-2581 FURBO COMPOSITE BASE

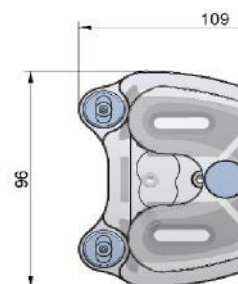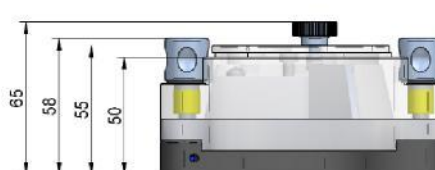

Via Retrone 14, Altavilla Vicentina | 36077 (Vicenza) - Italy
Tel. +39 0444 960 991 - Fax +39 0444 14 92 178 | info@vertysystem.com
www.vertysystem.com

Instrucțiuni de utilizare

10-2580

FURBO COMPOSITE

Ramă pentru matrițat și injectat compoziți fotopolimerizabili

Rev. 10/12/2015



FURBO COMPOSITE

Păstrând filozofia sistemului FURBO, a fost concepută rama pentru compoziți fotopolimerizabili **FURBO COMPOSITE**.

FURBO COMPOSITE folosește aceeași bază, crestare, aceleași piulițe de blocare, placă plexi și piuliță dinamometrică (**VERTYS DYNAMO BLOCK**) din sistemul **FURBO SYSTEM**.

FURBO SYSTEM este un "Proiect global" creat pe ideea inteligentă de a nu oferi un echipament static implicit, ci doar accesorii care, combinate unele cu altele, să formeze o ramă care să corespundă procedurii pe care dorim să o urmăm.

Caracteristici tehnice ale FURBO COMPOSITE:

- Aceeași bază și crestare ca și sistemul FURBO.
- Baza poate fi folosită cu sau fără crestătura VERTYSYSTEM®;
- Poziție repetabilă și fiabilă a modelului master;
- Mulțumită utilizării dispozitivului VERTYS COMPOSITE CUBE se evită irosirea inutilă de siliconi;
- Bază vare are același cuplaj cu VERTYS SPLIT CAST din sistemul VERTYSYSTEM®
- Multe accesorii ale FURBO COMPOSITE sunt folosite la alcătuirea altor rame.
- Inserțiile se potrivesc cu capacul unei a doua rame complet transparente de dimensiuni mici, ideală pentru polimerizatoare foarte joase (FURBO COMPOSITE INSIDE).
- Integrare completă în sistemul VERTYSYSTEM®
- Deosebit de versatil

Avantajele utilizării FURBO COMPOSITE sunt multiple:

1. Posibilitatea de a introduce în ramă modelul master fixat pe **VERTYS ARTIC LINK**, care se potrivește perfect pe baza din aluminiu **FURBO COMPOSITE**; baza din aluminiu se potrivește și cu toate dispozitivele **VERTYS SPLIT CAST** din cadrul sistemului **VERTYSYSTEM®**
2. Posibilitate de a introduce doar structura dentară (fără model master), datorită 10-2584 **FURBO COMPOSITE INBOX**, precum și a lucrărilor de implantologie.
3. Datorită **FURBO COMPOSITE CUBE** și **FURBO COMPOSITE SEPARATOR**, puteți închide zonele care nu necesită umplere cu silicon, evitând irosirea siliconului.
4. Siliconii transparenti **VERTYSYSTEM®** special concepuți pentru matrițarea și injectarea de material compozit sunt disponibili în diverse durități Shore A.

Cod	Produs	Descriere	buc.
10-2580	FURBO COMPOSITE	Sistem complet pentru injectarea și matrițarea de compoziți fotopolimerizabili fluizi și sub formă de pastă + VERTYS DYNAMO BLOCK	1
10-2581	FURBO COMPOSITE BASE	Sistem de bază pentru injectarea și matrițarea de compoziți fotopolimerizabili fluizi și sub formă de pastă	1
10-2586	FURBO COMPOSITE INSIDE	Ramă din plexiglas pentru injectarea de compoziți fotopolimerizabili fluizi	1

Accesorii

			buc.
10-2582	FURBO COMPOSITE COVER	Capac transparent din plexiglas	1
10-2524	VERTYS FURBO PLATE	Placă de închidere pentru capacele VERTYS FURBO PLEXI & VERTYS FURBO COMPOSITE	1
10-2583	FURBO COMPOSITE RING	Inel de cuplare pentru îmbinarea bazei furbo, din aluminiu anodizat auriu	1
10-2583H	FURBO COMPOSITE SPACER	Inel distanțier care ridică rama cu 6 mm	1
10-2584	FURBO COMPOSITE INBOX	Bază plexi de folosit cu FURBO COMPOSITE UPBOX sau în interiorul bazei	1
10-2585	FURBO COMPOSITE UPBOX	Capac din plexiglas pentru cuplarea la FURBO COMPOSITE INBOX	1
10-2587	FURBO COMPOSITE SEPARATOR	Separatoare din aluminiu anodizat pentru economie de silicon	2
10-2588	FURBO COMPOSITE CUBE	Cub separator din aluminiu anodizat pentru economie de silicon	1
10-2589	FURBO COMPOSITE SHORT AXIS	Ax scurt. Înălțime 48 mm pentru VERTYS FURBO COMPOSITE	3
10-2589L	FURBO COMPOSITE LONG AXIS	Ax lung. Înălțime 54 mm pentru VERTYS FURBO COMPOSITE	3
10-213-03	FURBO ALU NUT	Piuliță din oțel inoxidabil pentru FURBO COMPOSITE, FURBO ALU SMALL & BIG, cu cuplaj pentru VERTYS DYNAMO BLOCK	3



Subsemnata, **ȘTEFANA FORGACIU**, traducător autorizat de M. J. cu nr. **37629**,
certific exactitatea traducerii în limba română, cu textul înscrisului în copie electronică, în limba engleză.

TRADUCĂTOR ȘTEFANA FORGACIU - AUTORIZAT cu nr. **37629**

