

Instrucțiuni de utilizare

200-2020

HIGH SECURITY FLUID

pasiune pentru excelență

Material izolator siliconic cu o duritate finală (75 Shore A)

Rev. 25/11/2015

DOMENIU DE UTILIZARE

Material izolator, pe bază de silicon de adiție, pentru aplicarea prin injectare și prin presarea în ramă. Pentru izolarea și protejarea dinților acrilici sau din porțelan în timpul îmbrăcării. Se poate aplica ușor, într-o singură etapă pe dinții acrilici și ceară, formând un strat izolator subțire, foarte dur, pentru fixarea dinților în timpul presării.

RAPORT DE AMESTECARE & TIMP DE AMESTECARE

Umpleți bolul de amestecare cu baza până la primul marcaj, apoi adăugați catalizatorul până la al doilea marcaj. Amestecați **HIGH SECURITY FLUID** cu spatula, omogenizându-l, până obțineți o culoare uniformă.

APLICARE

Începând de la spațiile interdentale, aplicați **HIGH SECURITY FLUID** astfel amestecat, în mod uniform cu spatula, până ce obțineți o grosime de aproximativ 3 mm. Înainte de întărirea **HIGH SECURITY FLUID**, realizați degajări inferioare cu ajutorul unui cuțit pentru ceară.

Astfel se obține o priză optimă la gips. Nu este nevoie de cristale de retenție. Scoaterea din ramă: După polimerizare, scoateți în mod obișnuit din ramă și îndepărtați **HIGH SECURITY FLUID**. Sfaturi importante de lucru: Evitați marginile conice subțiri ale **HIGH SECURITY FLUID**. Se recomandă tăierea unui umăr mic, pentru a preveni separația în ramă. Temperaturile ridicate accelerează, temperaturile scăzute întârzie întărirea. Recipientele trebuie să fie închise ermetic imediat după fiecare utilizare!

Materialele vulcanizate sunt inerte din punct de vedere chimic. A se evita petele pe îmbrăcăminte!

HIGH SECURITY FLUID este recomandat pentru **VERTYSYSTEM®**.

AMBALAJ

2 fiole (250 g bază + 250 g catalizator)

+2 boluri pentru amestecarea materialului



Instrucțiuni de utilizare

200-2020

HIGH SECURITY FLUID

pasiune pentru excelență

Material izolator siliconic cu o duritate finală (75 Shore A)

Rev. 25/11/2015

DATE TEHNICE

Raport de amestecare:	1:1
Cod de culoare;	Bază: albastru deschis Catalizator: alb
Timp de amestecare:	aprox. 45 de secunde. Timp de lucru: aprox. 4 min. *Timp de întărire: aprox. 15 minute.*
Duritate finală:	După 15 minute 75 Shore A
Aplicare:	La $23\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ / $73\text{ }^{\circ}\text{F} \pm 4\text{ }^{\circ}\text{F}$, $50 \pm 5\%$ umiditate relativă *de la începutul amestecării la $23\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ / $73\text{ }^{\circ}\text{F} \pm 4\text{ }^{\circ}\text{F}$, $50 \pm 5\%$ umiditate relativă. Temperaturile ridicate accelerează, temperaturile scăzute prelungesc perioadele indicate.

DURATĂ DE PĂSTRARE

HIGH SECURITY FLUID se poate păstra timp de 24 de luni de la data fabricației, dacă este depozitat în cartușe închise ermetic.

DEPOZITARE

Depozitați produsul într-un recipient ermetic la temperaturi cuprinse între $15\text{ }^{\circ}\text{C}$ și $28\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($59\text{ }^{\circ}\text{F}$ și $82,4\text{ }^{\circ}\text{F}$)

SIGURANȚĂ

Consultați Fișa de Date de Securitate pentru **HIGH SECURITY FLUID**.

Recomandăm respectarea instrucțiunilor de siguranță pentru produse.

IMPORTANT

a.gree srl garantează că produsele sale sunt conforme cu specificațiile produsului. Informațiile din datele tehnice și instrucțiunile de utilizare se bazează pe cunoștințele noastre actuale. Dat fiind că nu putem cunoaște toate modalitățile în care produsele noastre ar putea fi utilizate, și nici în ce condiții, nu ne asumăm nicio răspundere pentru utilizarea materialului în alt scop decât cel căruia acesta îi este destinat. Citiți întotdeauna cu atenție instrucțiunile de utilizare când folosiți o nouă șarjă de material. Ne rezervăm dreptul de a efectua oricând modificări și îmbunătățiri ale prezentului produs și al ambalajului. Pentru a vedea cum se folosește împreună cu VERTYSYSTEM®, descărcați Protocoalele de Lucru de pe pagina de web www.vertysystem.com.

Subsemnata, **ȘTEFANA FORGACIU**, traducător autorizat de M. J. cu nr. **37629**,
certific exactitatea traducerii în limba română, cu textul înscrisului în copie electronică, în limba engleză.

TRADUCĂTOR **ȘTEFANA FORGACIU** - *AUTORIZAT* cu nr. **37629**

