

Instrucțiuni de utilizare



200-4030

VERTYS RETARD

Retarder pentru silicon de adăție

Rev. 15/12/2015

VERTYS RETARD este un lichid care prelungește perioada de întărire a siliconilor de adăție.

APLICARE

Acest produs este o formulă specifică pentru utilizarea împreună cu siliconii 200-2001 **VERTYS EASY PUTTY** și 200-200-2002 **VERTYS PUTTY PRESS**.

PENTRU LABORATORUL DENTAR

Uneori, în funcție de caz, este nevoie să se prelungească perioada de întărire a 200-2001 **VERTYS EASY PUTTY** sau a 200-2002 **VERTYS PUTTY PRESS**; **VERTYS RETARD** întârzie întărirea acestor siliconi. În cazul lucrărilor realizate cu **VERTYSYSTEM®** și care conțin o cantitate mare de **VERTYS EASY PUTTY** sau de **VERTYS PUTTY PRESS**, sunt de regulă suficiente 1-2 picături de **VERTYS RETARD** pentru a putea lucra cu calm cu **FURBO ALU BIG**.

A se vedea Protocolul de Lucru DANTURĂ INJECTATĂ - DANTURĂ PRESATĂ.

MOD DE UTILIZARE

Dozați cantități egale din componentele **A + B** din siliconul dorit și adăugați **VERTYS RETARD** la amestec

Amestecați bine și frământați componentele **A și B** cu mâna până ce obțineți o culoare și o consistență omogene.

O picătură de VERTYS RETARD prelungește perioada în care puteți lucra cu 200-2001 VERTYS EASY PUTTY sau cu 200-200-2002 VERTYS PUTTY PRESS cu cca. 1-1,5 minute.

Consultați instrucțiunile de folosire pentru a afla care sunt timpii standard de întărire pentru produsele VERTYS EASY PUTTY și VERTYS PUTTY PRESS.

DURATĂ DE PĂSTRARE

VERTYS RETARD se poate depozita timp de 24 de luni de la data fabricației, dacă sunt respectate condițiile de depozitare.

DEPOZITARE

Depozitați produsul într-un recipient ermetic la temperaturi cuprinse între 15 °C și 28 °C (59 °F și 82,4 °F)

Instrucțiuni de utilizare



200-4030

VERTYS RETARD

Retarder pentru silicon de adiție

Rev. 15/12/2015



AMBALAJ

VERTYS RETARD flacoane de 10 ml

SIGURANȚĂ

Consultați Fișa de Securitate pentru VERTYS RETARD.

Recomandăm respectarea instrucțiunilor de siguranță pentru produsele VERTYS RETARD.

IMPORTANT

a.gree srl garantează că produsele sale sunt conforme cu specificațiile produsului. Informațiile din datele tehnice și instrucțiunile de utilizare se bazează pe cunoștințele noastre actuale. Dat fiind că nu putem cunoaște toate modalitățile în care produsele noastre ar putea fi utilizate, și nici în ce condiții, nu ne asumăm nicio răspundere pentru utilizarea materialului în alt scop decât cel căruia acesta îi este destinat. Citiți întotdeauna cu atenție instrucțiunile de utilizare când folosiți o nouă șarjă de material. Ne rezervăm dreptul de a efectua oricând modificări și îmbunătățiri ale prezentului produs și al ambalajului.

Subsemnata, **ȘTEFANA FORGACIU**, traducător autorizat de M. J. cu nr. **37629**,
certific exactitatea traducerii în limba română, cu textul înscrisului în copie electronică, în limba engleză.

TRADUCĂTOR ȘTEFANA FORGACIU - AUTORIZAT cu nr. **37629**



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Forgaci", written over the right side of the circular stamp.