

Instrucțiuni de utilizare



200-200 _

VERTYS EASY PUTTY

Silicon de adiție cu duritate finală 70 shore A

Rev. 15/12/2015

VERTYS EASY PUTTY A+B este un silicon elastomeric de adiție bicomponent care se întărește la temperatura camerei (raport 1:1)

UTILIZARE

Acest produs a fost dezvoltat pentru uzul exclusiv în laboratorul dentar.

PENTRU LABORATORUL DE TEHNICĂ DENTARĂ

VERTYS EASY PUTTY este un silicon de adiție pentru legarea și capsularea mulajelor, special conceput pentru a obține cele mai bune rezultate împreună cu ceilalți siliconi din gama **VERTYS CONSUMER**, lucrând în sistemul **VERTYSYSTEM®**.

VERTYS EASY PUTTY se folosește în multe proceduri executate în laboratorul dentar, mai ales la realizarea de:

- Coroane temporare
- Proteze amovibile
- Ortodonție
- Duplicare de modele
- Implantologie
- Amprentarea ceramică

Pentru detalii cu privire la utilizarea VERTYS EASY PUTTY împreună cu VERTYSYSTEM®, consultați Protocoalele de Lucru și filmele de pe pagina web www.vertysystem.com.

AVANTAJE

1. Excelentă reproducere a detaliilor
2. Proprietăți mecanice bune
3. Contractie liniară redusă
4. Fără urme toxice în timpul sau după întărire
5. Rezistență crescută la substanțe chimice anorganice și la UV
6. Proprietăți bune de desprindere cu rășini organice și gips hidratat
7. Rezistență la temperaturi de până la 150° C - 302°F
8. Proiectat pentru a fi utilizat cu **VERTYS ORANGE PLUS**

5+5



1,5 + 1,5



AMBALAJ

200-2001	VERTYS EASY PUTTY	5 Kg A + 5 Kg B
200-2003	VERTYS EASY PUTTY	2x 1,5 Kg A + 1,5 Kg B (tot 6 kg)

CARACTERISTICI



Via Retrone 14, Altavilla Vicentina | 36077 (Vicenza) - Italy
Tel. +39 0444 960 991 - Fax +39 0444 14 92 178
info@vertysystem.com | www.vertysystem.com

Instrucțiuni de utilizare



200-200 _

VERTYS EASY PUTTY

Silicon de aditie cu duritate finală 70 shore A

Rev. 15/12/2015

1. VERTYS EASY PUTTY A+B înainte de vulcanizare

	A:	B:
Consistență	pastă	pastă
Culoare	alb	somon
Gust	niciunul	niciunul
Miros	niciunul	niciunul

2) Procedură de vulcanizare

Amestecați 100 de părți de **VERTYS EASY PUTTY A** cu 100 de părți de **VERTYS EASY PUTTY B**

Timp de amestecare la 23 °C - 73,4 °F	30 de secunde
Timp de lucru la 23 °C - 73,4 °F	aprox. 1 minut
Timp de întărire la 23 °C - 73,4 °F	aprox. 2 minute
Total procedură aprox.	3 minute și 30 de secunde

- temperaturile mai ridicate reduc timpii de întărire
- temperaturile mai scăzute cresc timpii de întărire
- pentru a prelungi timpul de lucru, puteți folosi lichidul 200-4030 **VERTYS RETARD**.

UTILIZARE

Adăugați 100 de părți de **VERTYS EASY PUTTY A** la 100 de părți de **VERTYS EASY PUTTY B**. Amestecați bine și frământați componentele A și B până când obțineți o culoare și o consistență omogene.

ATENȚIE

Întărirea **VERTYS EASY PUTTY A+B**, care se vulcanizează prin aditie, poate fi împiedicată de următoarele materiale:

- săruri de metale grele
- amine
- sulf și compuși ai sulfului
- catalizatori de rășini epoxidice

DURATĂ DE PĂSTRARE

VERTYS EASY PUTTY A+B se poate depozita timp de 24 de luni de la data fabricației, dacă sunt respectate condițiile de depozitare.

DEPOZITARE

Depozitați produsul într-un recipient ermetic la temperaturi cuprinse între 15 °C și 28 °C (59 °F și 82,4 °F)

SIGURANȚĂ

Consultați Fișa de Date de Securitate pentru **VERTYS EASY PUTTY A+B**

IMPORTANT

a.gree srl garantează că produsele sale sunt conforme cu specificațiile produsului. Informațiile din datele tehnice și instrucțiunile de utilizare se bazează pe cunoștințele noastre actuale. Dat fiind că nu putem cunoaște toate modalitățile în care produsele noastre ar putea fi utilizate, și nici în ce condiții, nu ne asumăm nicio răspundere pentru utilizarea materialului în alt scop decât cel căruia acesta îi este destinat. Citiți întotdeauna cu atenție instrucțiunile de utilizare când folosiți o nouă șarjă de material. Ne rezervăm dreptul de a efectua oricând modificări și îmbunătățiri ale prezentului produs și al ambalajului. Pentru a vedea cum se folosește împreună cu **VERTYSYSTEM®**, descărcați Protocoalele de Lucru de pe pagina de web www.vertysystem.com.

Subsemnata, **ȘTEFANA FORGACIU**, traducător autorizat de M. J. cu nr. **37629**,
certific exactitatea traducerii în limba română, cu textul înscrisului în copie electronică, în limba engleză.

TRADUCĂTOR ȘTEFANA FORGACIU - AUTORIZAT cu nr. **37629**



Forgaciu Ștefana