

Instrucțiuni de utilizare



200-2000

VERTYS ORANGE PLUS

Silicon de aditie de mare precizie cu duritate finală 64 shore A

Rev. 15/12/2015

VERTYS ORANGE PLUS este un silicon de aditie Silicon de aditie de înaltă precizie, special proiectat pentru a obține rezultate optime împreună cu **VERTYSYSTEM®**. **VERTYS ORANGE PLUS** este util în următoarele tipuri de lucrări desfășurate în laboratorul dentar:

- Fabricarea de coroane și punți temporare
- Proteze amovibile
- Amprentare porțelan
- Duplicare ceară
- Compozit de mulaj
- Implantologie

Pentru a vedea cum se folosește împreună cu VERTYSYSTEM®, descărcați Protocoalele de Lucru de pe pagina de web www.vertysystem.com.

TIMPI DE LUCRU

Raport de amestecare	Bază: Catalizator 1: 1
Timp de amestecare ISO:	35 de secunde
Timp de lucru ISO:	3 minute
Timp total:	3 minute și 35 de secunde
Memorie elastică:	99.0%
Deformare la compresie:	1,5 – 2,2%
Modificare de dimensiune:	- 0,2%

PREGĂTIREA MODELULUI

După 30 de minute puteți începe să turnați modelul. Spălarea amprentei cu săpun și limpezirea cu apă caldă și uscarea vor ajuta la reducerea tensiunii superficiale în timpul turnării modelului din gips. Toate gipsurile dentare standard pot fi folosite la fabricarea modelului (de ex. Fujirock Dental Stone, Hard Rock Dental Stone).

PLACARE ELECTROLITICĂ

VERTYS ORANGE PLUS se poate galvaniza fie în baie de argint, fie în baie de cupru.

ATENȚIE: Lingurile cu cod de culoare corespund culorilor masticurilor și nu trebuie amestecate.

Pericol de contaminare încrucișată.

1. Luați baza și catalizatorul cu degetul din găletoșe și frământați-le bine împreună.
2. Frământați masticul amestecat cu vârfurile degetelor până când obțineți o culoare uniformă. ! Folosiți întotdeauna baza și catalizatorul din același lot sau ambalaj. Perioadele mai lungi de amestecare și/sau temperaturile mai ridicate accelerează timpul de întărire; temperaturile mai scăzute prelungesc timpul de întărire.

AMBALAJ

200-2000

VERTYS ORANGE PLUS

480 ml A + 480 ml B



Instrucțiuni de utilizare



200-2000

VERTYS ORANGE PLUS

Silicon de aditie de mare precizie cu duritate finală 64 shore A

Rev. 15/12/2015

IMPORTANT

Uleiurile pentru piele, mănușile de latex și suprafețele contaminate cu latex pot afecta întărirea siliconului. Este indicat a materialul să intre în contact doar cu mănuși care au fost bine spălate și limpezite (spălați timp de 15 secunde cu săpun și apoi limpeziți cu jet de apă timp de 15 secunde), sau folosiți mănuși din vinil. În caz de dezinfectare cu apă oxigenată, se recomandă să se limpezească bine cu apă caldă, pentru a se evita formarea de bule de aer. Pentru a garanta o priză bună când se adaugă materialul de corectare, primul strat trebuie să fie spălat și uscat cu grijă.

DATE TEHNICE ISO 4823

Testele au fost efectuate la 23 °C / 73 °F și la o umiditate relativă de 50%.

CONTRAINDICAȚII

Dacă este folosit în mod corect, produsul nu are contraindicații.

EFECTE SECUNDARE / REACȚII

Polivinilsiloxanii sunt biocompatibili. La momentul de față nu se cunosc reacții sau efecte adverse toxice.

DOZARE

Dozați un număr egal de linguri rase de bază și de catalizator.

TIP DE MATERIAL

Silicon elastomeric, polivinilsiloxan, vulcanizare prin aditie, consistență frământabilă.

Bază: Portocaliu-marونی Catalizator: gri deschis

ISO 4823, Tip 0, Consistență: mastic

DEPOZITARE ȘI EXPIRARE

VERTYS ORANGE PLUS își va păstra proprietățile până la data expirării înscrisă pe recipient dacă recipientul este păstrat închis ermetic, la o temperatură de 15–23 °C / 59–73 °F și o umiditate relativă de 50%.

Păstrați amprenta / matrița la temperatura camerei. Evitați expunerea la radiația solară directă și la surse de căldură.

Data expirării și numărul de lot se găsesc pe ambalaj.

Recomandăm respectarea instrucțiunilor de siguranță pentru produse.

IMPORTANT

a.gree srl garantează că produsele sale sunt conforme cu specificațiile produsului. Informațiile din datele tehnice și instrucțiunile de utilizare se bazează pe cunoștințele noastre actuale. Dat fiind că nu putem cunoaște toate modalitățile în care produsele noastre ar putea fi utilizate, și nici în ce condiții, nu ne asumăm nicio răspundere pentru utilizarea materialului în alt scop decât cel căruia acesta îi este destinat. Citiți întotdeauna cu atenție instrucțiunile de utilizare când folosiți o nouă șarjă de material. Ne rezervăm dreptul de a efectua oricând modificări și îmbunătățiri ale prezentului produs și al ambalajului.

Subsemnata, **ȘTEFANA FORGACIU**, traducător autorizat de M. J. cu nr. **37629**,
certific exactitatea traducerii în limba română, cu textul înscrisului în copie electronică, în limba engleză.

TRADUCĂTOR ȘTEFANA FORGACIU - AUTORIZAT cu nr. **37629**



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Forgaci", written over the right side of the circular stamp.