

Instrucțiuni de utilizare



200-4001

VERTYS ORANGE SPECIAL LUBE

Spray separator silicon-silicon | ideal pentru VERTYS ORANGE PLUS

Rev. 15/12/2015

VERTYS ORANGE SPECIAL LUBE este un separator universal silicon-silicon compus din ceruri și rășini sintetice.

APLICARE

Este esențial să se aplice **VERTYS ORANGE SPECIAL LUBE** pentru a obține o desprindere perfectă când se îmbină siliconi de adiție din gama **VERTYS CONSUMER**. Utilizarea sa este recomandată când se lucrează cu 200-2000 **VERTYS ORANGE PLUS**.

CARACTERISTICI

- Aplicare ușoară
- Nu formează un strat gros, datorită pulverizării fine
- Se usucă repede
- Culoare albă opacă

MOD DE UTILIZARE

- Curățați bine siliconul de adiție de izolat.
- Este important să aplicați **VERTYS ORANGE SPECIAL LUBE** abundant, fără grijă că se va forma un strat gros, dat fiind că sprayul pulverizează foarte fin și se evaporă rapid.
- Lăsați să se usuce timp de circa 3 minute, după care suprafața va avea un aspect mat.
- Este esențial să se aplice **VERTYS ORANGE SPECIAL LUBE** în situații în care se folosește rășina acrilică temporară **VERTYS TEMPLUS** cu lichidul de vulcanizare la cald. (a se vedea instrucțiunile de utilizare pentru **VERTYS TEMPLUS HOT**)

PRECAUȚII

- Folosiți produsul în spații bine ventilate.
- Se recomandă să se folosească întotdeauna mănuși și ochelari de protecție.

VERTYS ORANGE SPECIAL LUBE nu poate fi folosit împreună cu următorii siliconi transparenți:

200-2007	VERTYS HEAVY GLASS	A + B	72 Shore A
200-2008	VERTYS LIGHT GLASS	Kg 1 A + Kg 1 B	22 Shore A
200-2009	VERTYS MEDIUM GLASS	Kg 1 A + Kg 1 B	50 Shore A

Se poate obține o separare bună dacă se aplică un strat de parafină pe acești siliconi.



AMBALAJ

200-4001 **VERTYS ORANGE SPECIAL LUBE**

Spray: 85 ml

Instrucțiuni de utilizare



200-4001

VERTYS ORANGE SPECIAL LUBE

Spray separator silicon-silicon | ideal pentru VERTYS ORANGE PLUS

Rev. 15/12/2015

DEPOZITARE

A se feri de sursele de căldură, a nu se expune **VERTYS ORANGE SPECIAL LUBE** la temperaturi mai mari de 45°C - 13°F. A se feri de lumina excesivă (lumina soarelui)

A se păstra într-un spațiu răcoros, uscat și bine ventilat.

Nu perforați recipientul, conține gaz inflamabil.

ELIMINARE

Eliminați recipientul doar când este complet gol.

SIGURANȚĂ

Consultați Fișa de Date de Securitate pentru **VERTYS ORANGE SPECIAL LUBE**.

SCURTE INSTRUCȚIUNI DE DEPOZITARE ȘI SIGURANȚĂ

Nu folosiți produsul după data de expirare. Depozitați materialele doar în recipientele lor originale la temperatura camerei care să nu depășească 25° C - 77°F. Produsul este foarte inflamabil (lichid). Componente sunt substanțe iritante, se va evita contactul cu ochii și pielea. !!

Recomandăm respectarea instrucțiunilor de siguranță pentru produse.

Pentru a vedea cum se folosește împreună cu VERTYSYSTEM®, descărcați Protocoalele de Lucru de pe pagina de web www.vertysystem.com.

IMPORTANT

a.gree srl garantează că produsele sale sunt conforme cu specificațiile produsului. Informațiile din datele tehnice și instrucțiunile de utilizare se bazează pe cunoștințele noastre actuale. Dat fiind că nu putem cunoaște toate modalitățile în care produsele noastre ar putea fi utilizate, și nici în ce condiții, nu ne asumăm nicio răspundere pentru utilizarea materialului în alt scop decât cel căruia acesta îi este destinat. Citiți întotdeauna cu atenție instrucțiunile de utilizare când folosiți o nouă șarjă de material. Ne rezervăm dreptul de a efectua oricând modificări și îmbunătățiri ale prezentului produs și al ambalajului. Pentru a vedea cum se folosește împreună cu VERTYSYSTEM®, descărcați Protocoalele de Lucru de pe pagina de web www.vertysystem.com.

Subsemnata, **ȘTEFANA FORGACIU**, traducător autorizat de M. J. cu nr. **37629**,
certific exactitatea traducerii în limba română, cu textul înscrisului în copie electronică, în limba engleză.

TRADUCĂTOR ȘTEFANA FORGACIU - AUTORIZAT cu nr. **37629**



Forgaciu Ștefana