

Instrucțiuni de utilizare



200-4000

VERTYS SILIKON LUBE

Spray universal silicon-silicon pentru izolarea siliconilor

Rev. 15/12/2015

VERTYS SILIKON LUBE este un separator universal silicon-silicon compus din ceruri și rășini sintetice.

APLICARE

Este esențial să se aplice **VERTYS SILIKON LUBE** pentru a obține o desprindere perfectă când se îmbină siliconi de adiție din gama **VERTYS CONSUMER**.

Se recomandă să se aplice **VERTYS SILIKON LUBE** pe 10-0010 **SPLIT CAST VERTYSYSTEM®** înainte de a se turna gipsul, pentru a se obține o desprindere perfectă (un strat ușor este suficient).

Pentru detalii cu privire la utilizarea VERTYS PINK împreună cu VERTYSYSTEM®, consultați Protocoalele de Lucru și filmele de pe pagina web www.vertysystem.com.

ÎNTREȚINEREA VERTYSYSTEM®

Este foarte important să se pulverizeze **VERTYS SILIKON LUBE** pe ramele din aluminiu anodizat, **FURBO ALU BIG** și **FURBO ALU SMALL**, după fiecare utilizare. Aplicarea constantă a **VERTYS SILIKON LUBE** garantează o utilizare adecvată și o viață lungă a echipamentelor.

IMPORTANT

VERTYS SILIKON LUBE nu poate fi folosit împreună cu următorii siliconi transparenți:

200-2007	VERTYS HEAVY GLASS	72 Shore A	cartușe A + B
200-2008	VERTYS LIGHT GLASS	22 Shore A	pachet Kg 1 A + Kg 1 B
200-2009	VERTYS MEDIUM GLASS	50 Shore A	pachet Kg 1 A + Kg 1 B

Se poate obține o separare bună dacă se aplică un strat de vaselină pe acești siliconi.

CARACTERISTICI

- Aplicare ușoară
- Nu formează un strat gros, datorită pulverizării fine
- Se usucă repede
- Culoare albă opacă



AMBALAJ

Doză de spray de 200 ml

Instrucțiuni de utilizare



200-4000

VERTYS SILIKON LUBE

Spray universal silicon-silicon pentru izolarea siliconilor

Rev. 15/12/2015

MOD DE UTILIZARE

- Curățați bine siliconul de adădire de izolat.
- Este important să aplicați **VERTYS SILIKON LUBE** abundent, fără grijă că se va forma un strat gros, dat fiind că sprayul pulverizează foarte fin și se evaporă rapid. Lăsați să se usuce timp de circa 10 minute, după care suprafața va avea un aspect mat.

PRECAUȚII

- Folosiți produsul în spații ventilate
- **Se recomandă să se folosească întotdeauna mănuși și ochelari de protecție.**

DEPOZITARE

- A se feri de sursele de căldură, a nu se expune **VERTYS SILIKON LUBE** la temperaturi mai mari de 45 °C - 113 °F
- A se feri de lumina excesivă (radiație solară)
- A se păstra într-un spațiu răcoros, uscat și bine ventilat.
- **Nu perforați recipientul, conține gaz inflamabil.**

ELIMINARE

Eliminați recipientul doar când este complet gol.

SCURTE INSTRUCȚIUNI DE DEPOZITARE ȘI SIGURANȚĂ

Nu folosiți produsul după data de expirare. Depozitați materialele doar în recipientele lor originale la temperatura camerei care să nu depășească 25 °C - 77 °F. Produsul este foarte inflamabil (lichid). Componentele sunt substanțe iritante, se va evita contactul cu ochii și pielea.

Consultați Fișa de Date de Securitate pentru VERTYS SILIKON LUBE.

IMPORTANT

a.gree srl garantează că produsele sale sunt conforme cu specificațiile produsului. Informațiile din datele tehnice și instrucțiunile de utilizare se bazează pe cunoștințele noastre actuale. Dat fiind că nu putem cunoaște toate modalitățile în care produsele noastre ar putea fi utilizate, și nici în ce condiții, nu ne asumăm nicio răspundere pentru utilizarea materialului în alt scop decât cel căruia acesta îi este destinat.

Citiți întotdeauna cu atenție instrucțiunile de utilizare când folosiți o nouă șarjă de material.

Ne rezervăm dreptul de a efectua oricând modificări și îmbunătățiri ale prezentului produs și al ambalajului.

Subsemnata, **ȘTEFANA FORGACIU**, traducător autorizat de M. J. cu nr. **37629**,
certific exactitatea traducerii în limba română, cu textul înscrisului în copie electronică, în limba engleză.

TRADUCĂTOR ȘTEFANA FORGACIU - AUTORIZAT cu nr. **37629**

