

Instrucțiuni de utilizare



200-24__

VERTYS PROTHESIS EXCEL

Rășină cu vulcanizare la rece încărcată cu micro-perle compozite

Rev. 14/12/2015

O rășină acrilică vulcanizată la cald sub presiune, bazată pe metil-metacrilat.

VERTYS PROTHESIS EXCEL este adecvată pentru executarea tuturor tipurilor de lucrări amovibile. Culoare stabilă, fără amine terțiare libere și cadmiu.

VERTYS PROTHESIS EXCEL este ușor de folosit și are proprietăți mecanice și fizice îmbunătățite.

UTILIZARE

Degresați bine modelul din gips cu apă fierbinte curată sau cu un aparat de curățat cu aburi. Pentru a evita desprinderea dinților acrilici, este indicat ca suprafața lor să fie înăspriță, să se taie retenții pe gulere și să se umezească cu monomer.

Înmuiati modelul din gips în apă la o temperatură de 45 °C - 113 °F timp de 10 minute, pentru a vă asigura că este complet saturat. Scoateți modelul din apă și lăsați-l la uscat. Aplicați un strat subțire de separator **VERTYS LUBE** cu o perie moale. Asigurați-vă că nu rămâne exces de separator în concavitățile modelului. O suprafață uscată și lucioasă este semn că modelul este bine separat. Turnați prima dată lichidul și apoi pulberea într-un bol de amestecare ceramic sau din sticlă. Amestecați bine timp de 15 secunde, până când amestecul este omogen. În cazul injectării cu seringă, pentru tehnica **VERTYSYSTEM®**, amestecul trebuie să aibă o consistență vâscoasă. Rășina este gata de a fi injectată în rama **VERTYSYSTEM® FURBO ALU BIG / SMALL**. Timpii de lucru sunt valabili pentru o temperatură a materialului și a încăperii de 20-23°C - 59 °F-73,4 °F. Temperaturile mai ridicate sau mai scăzute pot modifica timpii de lucru. **VERTYS PROTHESIS EXCEL** se poate folosi în diverse tehnici de execuție.

Se recomandă să se lase lucrarea finalizată în apă la temperaturi de 35-38 °C - 100,4 °F timp de 24 de ore, pentru a reduce cantitatea de monomer liber.

DOZARE

20 de grame de pulbere la 8/10 grame de lichid (pentru o proteză de dimensiuni medii) Prea mult lichid duce la o contracție accentuată a materialului în timpul întăririi!

TIMP DE AMESTECARE:

10 sec. odihnă: 15-20 sec. turnare în seringă și injectare

TIMP DE INJECTARE

aprox. 1 minut

POLIMERIZARE

Dispozitiv de vulcanizare (sau vas sub presiune) timp de 30-40 de minute la 2-3 bar și 45-55 °C - 113°F-131°F.

VERTYS PROTHESIS EXCEL se poate folosi și pentru recăptușiri sau pentru repararea de proteze. Înainte de a aplica rășina, înăspriți, curățați și umeziți zonele ce trebuie recăptușite și/sau marginile cu monomer.

SCURTE INSTRUCȚIUNI DE DEPOZITARE ȘI SIGURANȚĂ

Nu folosiți produsul după data de expirare. Depozitați materialele doar în recipientele lor originale la temperatura camerei care să nu depășească 25° C - 77°F. Produsul este foarte inflamabil (lichid). Componentele sunt substanțe iritante, se va evita contactul cu ochii și pielea.



Instrucțiuni de utilizare



200-24_ _

VERTYS PROTHESIS EXCEL

Rășină cu vulcanizare la rece încărcată cu micro-perle compozite

Rev. 14/12/2015



AMBALAJ

200-2400	VERTYS PROTHESIS EXCEL LIQUID	500 ml	
200-2401	VERTYS PROTHESIS EXCEL LIQUID	1000 ml	
200-2402	VERTYS PROTHESIS EXCEL LIQUID	50 ml	
200-2403	VERTYS PROTHESIS EXCEL	1000 g	ROZ CLASIC NERVURAT
200-2404	VERTYS PROTHESIS EXCEL	100 g	CLASSIC PINK VEINED
200-2405	VERTYS PROTHESIS EXCEL	1000 g	ROZ DESCHIS NERVURAT
200-2406	VERTYS PROTHESIS EXCEL	100 g	ROZ DESCHIS NERVURAT
200-2407	VERTYS PROTHESIS EXCEL	1000 g	PORTOCALIU ROZ
200-2408	VERTYS PROTHESIS EXCEL	100 g	PORTOCALIU ROZ
200-2409	VERTYS PROTHESIS EXCEL	1000 g	IMPLANT
200-2410	VERTYS PROTHESIS EXCEL	100 g	IMPLANT
200-2413	VERTYS PROTHESIS EXCEL	1000 g	ROZ CLASIC
200-2414	VERTYS PROTHESIS EXCEL	100 g	ROZ CLASIC

Pentru a vedea cum se folosește împreună cu VERTYSYSTEM®, descărcați Protocoalele de Lucru de pe pagina de web www.vertysystem.com.

IMPORTANT

a.gree srl garantează că produsele sale sunt conforme cu specificațiile produsului. Informațiile din datele tehnice și instrucțiunile de utilizare se bazează pe cunoștințele noastre actuale. Dat fiind că nu putem cunoaște toate modalitățile în care produsele noastre ar putea fi utilizate, și nici în ce condiții, nu ne asumăm nicio răspundere pentru utilizarea materialului în alt scop decât cel căruia acesta îi este destinat. Citiți întotdeauna cu atenție instrucțiunile de utilizare când folosiți o nouă șarjă de material. Ne rezervăm dreptul de a efectua oricând modificări și îmbunătățiri ale prezentului produs și al ambalajului.



0477 Dispozitiv medical încadrat în Clasa IIa conform Directivei 93/42/CEE.



Via Retrone 14, Altavilla Vicentina | 36077 (Vicenza) - Italy
Tel. +39 0444 960 991 - Fax +39 0444 14 92 178
info@vertysystem.com | www.vertysystem.com

Subsemnata, **ȘTEFANA FORGACIU**, traducător autorizat de M. J. cu nr. **37629**,
certific exactitatea traducerii în limba română, cu textul înscrisului în copie electronică, în limba engleză.

TRADUCĂTOR ȘTEFANA FORGACIU - AUTORIZAT cu nr. **37629**

